


CATÁLOGO DE PRODUTOS

ATM Fix

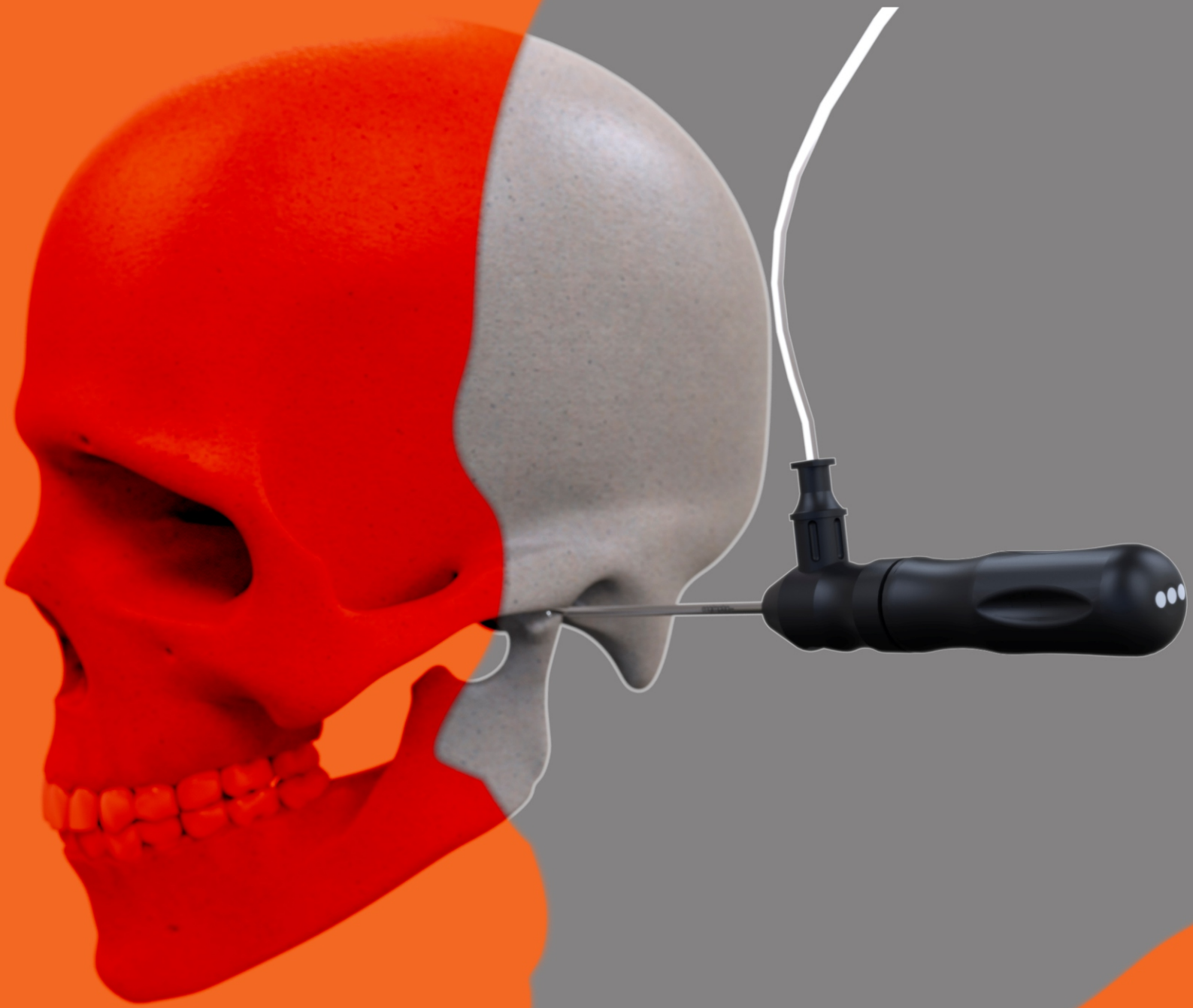

TECNOLOGIA QUE
TRANSFORMA VIDAS,
POTENCIALIZA SORRISOS
E MULTIPLICA
BONS MOMENTOS.




ATM Fix

OBJETIVO GERAL

O objetivo desse kit é possibilitar a realização de discopexia para reposicionamento dos discos articulares da articulação temporo-mandibular, com uso de âncoras de titânio ou material semelhante por via artroscópica.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

- **Cânula do trocarte com janela** – Cânula que servirá de portal para a passagem dos instrumentais para o interior da articulação. Apresenta uma janela na ponta em ambos os lados para permitir a visualização da passagem dos instrumentais durante o procedimento de artroscopia. O cabo permite uma melhor apreensão durante todo o procedimento.
- **Cânula do trocarte para perfuração** – Cânula que servirá de portal para a passagem das brocas de perfuração até a região da cabeça da mandíbula. Seu diâmetro é um pouco inferior à cânula com janela, pois ela deve ser passada por dentro da mesma e os cabos são semelhantes para permitir a apreensão simultânea.
- **Obturador** – Instrumental utilizado em associação com a cânula do trocarte com janela para realizar a perfuração da pele, tecido subcutâneo e cápsula articular. Apresenta uma ponta cortante para permitir a sua passagem pelos tecidos.
- **Ponta carregadora de nó** – Instrumental utilizado para levar o nó dado no fio até o disco articular. Apresenta uma pequena perfuração na ponta por onde uma das pontas do fio de sutura é passada para permitir o transporte do nó através do fio.
- **Trocarte de trabalho** – Cânula por onde serão introduzidos os instrumentais de trabalho dentro da articulação.
- **Obturador Cortante** – Instrumental utilizado em associação com a cânula do trocarte para realizar a perfuração da pele, tecido subcutâneo e cápsula articular, para posterior introdução dos instrumentais no interior da articulação.
- **Obturador Rombo** – Instrumental utilizado após a passagem da cânula e do obturador cortante pela cápsula articular, para introdução do portal de trabalho no interior da articulação sem causar dano aos tecidos articulares.
- **Ponta Gancho** – Utilizado para avaliação das estruturas intra-articulares e na artroscopia operatória para romper aderências e manipulação de estruturas durante o procedimento operatório.
- **Faca Banana/Meniscotomo** – Utilizado para realizar incisões intra-articulares, como na eliminação de aderências e realização da capsulotomia e miotomia.

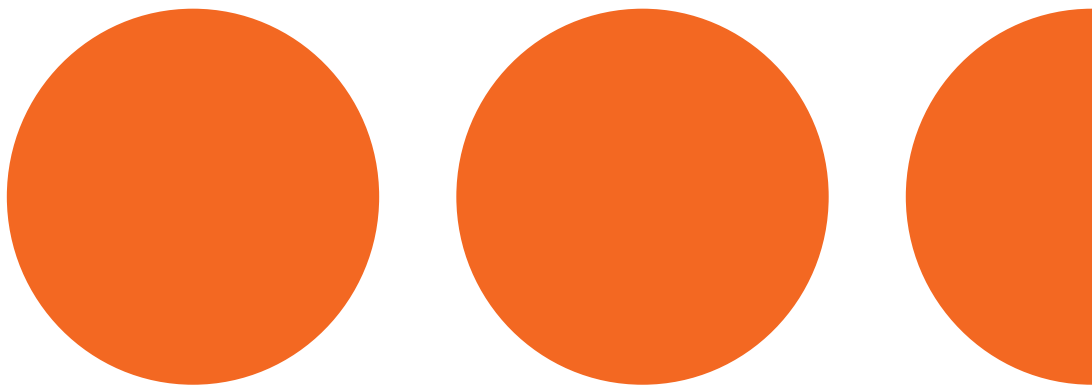



Kit cânula para fixação do disco mandibular

CÓDIGO

204.107520

DESCRIÇÃO

Guia para agulha



CÓDIGO

204.107530

DESCRIÇÃO

Agulha cureta longa



204.107525

Agulha ponta gancho



204.107532

Agulha ponta perfurante



204.107528

Agulha ponta romba



CÓDIGO
204.107534

DESCRIÇÃO
Guia com olhal



204.107.541 | Guia ø 2.7



204.107537 | Punção agulha perfurante



204.107.544 | Guia ø 1.5



204.107540 | Punção agulha reta



ENGIMPLAN.COM.BR

REVISÃO 00000 - 05/12/2016

engimplan...
engenharia de implantes

Condomínio Industrial Conpark

Rodovia Washington Luiz Km 172 s/nº | Rio Claro-SP

+55 (19) 3522-7487